

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая для профессиональной гигиенической чистки и полировки поверхностей зубов «Polir Clean» ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 24.08.2021 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Clean» предназначена для профессиональной гигиенической чистки и полировки поверхностей зубов: финишной обработки после удаления зубных отложений, удаления пятен от пищи и табака. Применяется в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Clean» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме, представляет собой пластичную, однородную пасту розового цвета. В состав пасты «Polir Clean» входят тонкий абразивный материал на основе силиката циркония с помощью которого осуществляется чистка и полировка поверхности зубов без повреждения эмали зубов, а также полимерные водорастворимые добавки, которые предотвращают разбрызгивание пасты.

Способ применения

Для полировки поверхности зубов используйте полировальные чашки или полировальные щётки. Закрепите полировальную чашку или полировальную щётку в угловой зуботехнический наконечник бормашины, нанесите пасту на рабочую поверхность полировальной чашки или полировальной щётки, полировку проводите со скоростью не более 7000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность зубов. Остатки пасты с поверхности зубов смойте водой.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

Паста массой (45 ± 5) г в банке полимерной.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %. Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Срок годности 3 года с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель

ООО «Целит», 394028 г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru