

Этикетка-инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из пластмасс всех видов «Polir Pro». ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 24.08.2021 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Pro» предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из пластмасс всех видов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Pro» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме. «Polir Pro» представляет собой твёрдую, однородную пасту светло-серого цвета, состоящую из тонкого абразивного материала с помощью которого осуществляется полировка поверхности до зеркального блеска и добавок, предотвращающих разбрызгивание пасты.

Способ применения

Нанесите пасту равномерным слоем на всю рабочую поверхность войлочного диска или щётки, полировку производите на низких оборотах мотора (до 1500 об/мин) с небольшой нагрузкой на поверхность протеза, до появления блеска полируемой поверхности. Протрите поверхность чистой салфеткой и проверьте, заполированы ли все следы шлифования. При необходимости, полировку проведите повторно.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

1. Паста массой (50±5) г в банке полимерной, с этикеткой-инструкцией;
 2. Паста массой (100±10) г, обёрнутая бумагой, с этикеткой-инструкцией;
 3. Паста массой (250±10) г, обёрнутая бумагой, с этикеткой-инструкцией.
- Форма выпуска указаны на упаковке.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98 %. Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Срок годности 5 лет с даты выпуска. Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель

ООО «Целит», 394028 г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru